

MASQUE FACIAL RÉUTILISABLE: NOTICE D'UTILISATION




1



Nettoyez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher le masque en tissu. **Tenez le masque par les attaches** pour le mettre et l'enlever, pour éviter toute contamination.

2

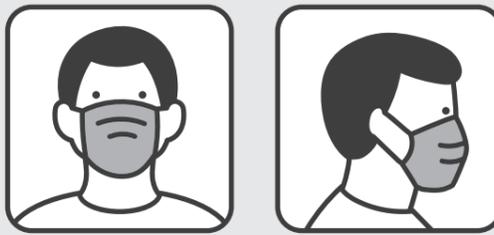


Assurez-vous que le masque est bien ajusté et qu'il couvre le nez, la bouche et le menton sans laisser de trous, mais vous devez pouvoir respirer par le nez et la bouche lorsque vous le portez.

3




Respectez les règles de base même lorsque vous portez votre masque en tissu : évitez de vous toucher le visage et maintenez une distance de sécurité d'au moins 1 mètre avec les autres.

4

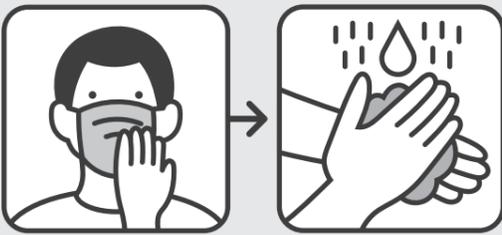


Si vous touchez le masque, lavez-vous les mains immédiatement après.

5

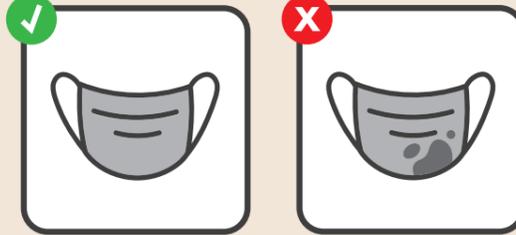


Si le masque devient humide ou sale, remplacez-le par un masque sec.

6

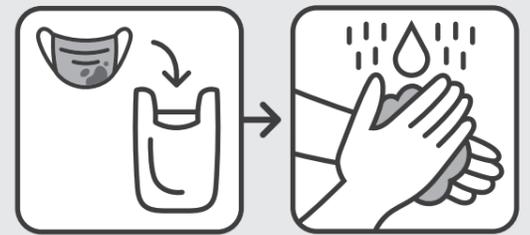

Lorsque le masque est enlevé, il doit être immédiatement lavé, ou stocké dans un sac en plastique fermé jusqu'à ce qu'il puisse être lavé. Vous devez ensuite vous laver les mains.

7

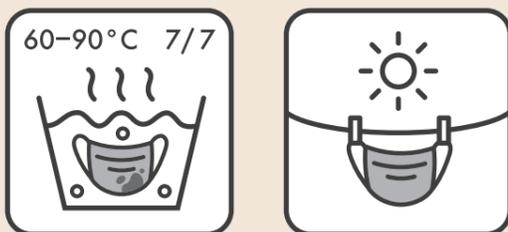

Lavez le masque au moins une fois par jour à 60-90 °C ou avec de l'eau et du savon (solution de chlore à 0,1 % si disponible). **Laissez le masque sécher complètement** avant de le réutiliser.

8



Si le masque a été rangé dans un sac après utilisation, il faut soit jeter le sac là où d'autres personnes ne peuvent pas le toucher, soit laver le sac et le laisser sécher. Ensuite, lavez-vous les mains.

i



LE MASQUE FACIAL RÉUTILISABLE N'EST PAS DESTINÉ AU PERSONNEL MÉDICAL SUR LE LIEU DE TRAVAIL.